

PROIZVOD: VEDOECOplus termometer za merjenje telesne temperature brez živega srebra s povečevalnim steklom in etuijem za lažje zbijanje

Proizvajalec: PIKDARE, Italija
Zastopnik za Slovenijo:
Prolat d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje
info@prolat.si www.prolat.si

NAVODILO ZA UPORABO

Termometer deluje na osnovi zmesi, imenovane galij, to je zmes indija in kositra. Galij je popolnoma nestrupena in okolju neškodljiva tekočina. Stekleni termometer z galijem ne vsebuje živega srebra; primerjamo ga lahko z najboljšimi tovrstnimi termometri za merjenje telesne temperature. Termometer je izdelan in preizkušen v skladu z zahtevami direktive 93/42/EWG, 2007/47/EG.

Standard EN 12470-1:2009. Termometer za merjenje telesne temperature 1. del: termometri s tekočo kovino.

Pomembna opozorila

Termometer je potrebno shranjevati v suhem prostoru na temperaturi, ki ni nižja od -15°C in ni višja od 42°C . Ne shranjujte ga v bližini toplinskih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Po končani uporabi termometer dobro očistite in sterilizirajte z ustreznim dezinfekcijskim sredstvom, ne smete pa ga segreti. Shranjujte izdelek izven dosega otrok. Če merite telesno temperaturo otrokom, jih med merjenjem nikoli ne puščajte samih.

S tem termometrom lahko merite telesno temperaturo od vrednosti $35,5^{\circ}\text{C}$ do 42°C , natančnost meritve pa lahko odstopa od $-0,15^{\circ}\text{C}$ do $0,1^{\circ}\text{C}$.

Navodilo za uporabo shranite na vama mesto. V primeru visoke izmerjene temperature se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom.

Uporaba

Pred merjenjem se prepričajte, da je nivo galija pod prvo označeno vrednostjo (35°C oziroma 36°C). Temperaturo lahko izmerite aksilarno, oralno ali analno.

Po približno 4 (štiri) minutah merjenja lahko odčitate izmerjeno telesno temperaturo. Po koncu merjenja se mora tekočina vrniti na prvotno točko, pod prvo označeno vrednost. Ker je tekočina zelo lahka, jo boste lahko na osnovno mesto vrnili tako, da termometer vstavite v notranji del etuija, držite zgornji del in ga stresate. Termometer je hermetično in higiensko zaprt v stekleno škatlico, zato ga lahko brez škode vedno po uporabi očistimo in dezinficiramo.

Kako izmerimo telesno temperaturo?

Vzemite termometer iz škatlice.

Aksilarno merjenje (merjenje pod pazduho):

Termometer namestite z merilnim delom (s konico) v sredino pazduhe neposredno na kožo. Roko spustite in s tem držite termometer na želenem mestu, vendar roke ne stiskajte pretirano k sebi.

Oralno merjenje (merjenje v ustih):

Konico termometra namestite v spodnji del ust, pod jezik.

Rektalno merjenje (merjenje v zadnjični odprtini):

Konico termometra vstavite v analno odprtino, a ne globlje kot 0,5 cm. Če merite telesno temperaturo pri dojenčku, ga položite na trdno površino in mu dvignite nogice skoraj pravokotno navzgor in ga obenem trdno držite za gležnje, da miruje. Konico termometra nato zelo nežno vstavite.

Ne glede na to, katerega od načinov boste uporabili, temperaturo morate meriti vsaj 4 (štiri) minute.

Opozorilo v primeru razbitja termometra

Če se termometer razbije, previdno poberte vse koščke. Ker je tekočina v termometru popolnoma nestrupena in neškodljiva, jo lahko vržete med običajne gospodinjske odpadke.

Po uporabi zbijte skalo termometra do začetka merilne skale. Termometra ne zbijajte pod 36°C .