

NODOL® Termo Obliži

MEDICINSKI PRIPOMOČEK



Vsebnost: 3 obliži

Prednosti:

- ✓ Za revmatska obolenja in bolečine v mišicah.
- ✓ Naravno in varno delovanje.
- ✓ Enostavna in praktična uporaba.
- ✓ Ne draži kože.

NODOL® Termo Obliži so naravni vir toplote. Pravilna uporaba omogoča hitro dostopno toploto, ki ostane aktivna pri ugodni temperaturi več ur. Uporaba NODOL® Termo Obližev je primerna za pomiritev akutnih bolečin, ki so posledica revmatskih obolenj. Hitro in ciljno delujejo tudi pri bolečinah v mišicah.

Medicinski pripomoček je sestavljen iz mešanice praškastih snovi, vsebujoč železo, ki v stiku s kisikom iz zraka sprožijo hitro oksidacijo in sproščanje toplote.

SESTAVINE: železo, natrijev poliakrilat, aktivno oglje, natrijev klorid, natrijev tripolifosfat, voda.

NAVODILA ZA UPORABO:

- odprite vrečko (neposredno pred uporabo) in izvlecite obliž
- odstranite prozorno folijo
- obliž namestite na želeno mesto (na čisto in suho kožo), tako da ga dobro prilepite ob robovih
- odstranite po osmih urah, ne uporabljajte ponovno v roku 24-ih ur

OMEJITVE UPORABE IN KONTRAINDIKACIJE: Kontraindikacije niso znane pri terapevtskih odmerkih, razen v primeru preobčutljivosti na katerokoli sestavino izdelka. Izdelka ne uporabljajte na poškodovani koži.

OPOZORILA: Za zunanjo uporabo. Namestite samo na nepoškodovano, čisto in suho kožo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Natančno preberite navodila za uporabo. Prekinite z uporabo v primeru pojava draženja ali preobčutljivosti na izdelek. Delovanje in varnost izdelka sta zagotovljena v primeru nepoškodovane vrečke. Ne uporabljajte ponovno, shranjujte pri temperaturi do 40°C. Obliža ne rezite.

PROIZVAJALEC IN POREKLO: Zeta srl, Italija

FORMULACIJA IN DISTRIBUCIJA: ESI srl, Italija

ZASTOPNIK: Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6r, 6310 Izola, www.sanofarm.si