




ELEKTRONSKI NOSNI ASPIRATOR

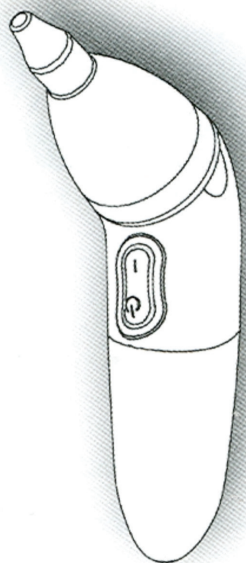

Model: 00-04-01



NAVODILA ZA UPORABO

POZOR!


IZGUBA TESNILA NA POSODICI ONEMOGOČA USTVARJANJE PODTLAKA, ZATO PREVIDNO S TESNILOM!

Opozorila

1. Z aspiratorjem sme rokovati le odrasla oseba, vsako otrokovo samostojno ravnanje z napravo ni primerno
2. Uporabljajte aspirator izključno za odstranjevanje otrokovega nosnega izcedka
3. Ne držite silikonske kapice v otrokovem nosu predolgo časa; nekaj sekund je dovolj, da odstranite ves izcedek
4. Ne zatikajte silikonske kapice pregloboko v nos; lahen stisk nosnice bo dovolj, da bo naprava pravilno delovala
5. Naprave nikakor ne uporabljajte, če obstaja kakšen znak za krvavenje, ali če je v nosu ranica ali vnetje
6. Aspirator pred in po vsaki uporabi dobro očistite (glej poglavje »Čiščenje naprave«)
7. Aspirator hranite v suhem in hladnem prostoru; odstranite baterije, če naprave ne nameravate uporabljati dalj časa
8. Naprava ni namenjena uporabi v medicinske namene; če nastopi kakršenkoli zdravstveni problem, pri priči prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom

Deli naprave

- A. Telo naprave
- B. Silikonski nosnik
- C. Pokrov posodice
- D. Podnožje posodice
- E. Prostor za zbiranje izcedka
- F. Priključek za dotok zraka
- G. Odprtina za dovod zraka
- H. Odprtina za odvod zraka
- I. Gumb za vklop
- J. Gumb za izklop
- K. Prostor za baterije
- L. Pokrov baterij

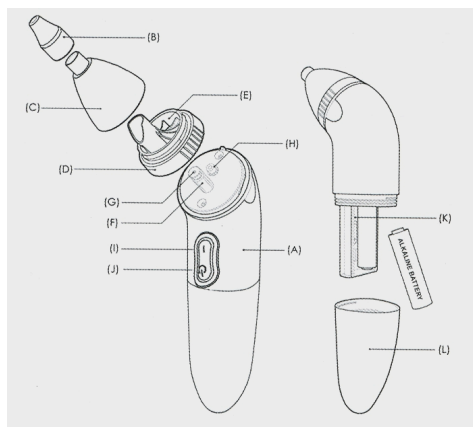

ELEKTRONSKI NOSNI ASPIRATOR

NAVODILA ZA UPORABO

Aspirator je čist in higieničen ter preprečuje nosnemu izcedku, da bi polzel po otrokovem obrazu.

Aspirator se po uporabi lahko očisti z vodo, kar onemogoča razvoj bakterij.

Lahek in lepo oblikovan, je hiter in učinkovit.

Popolnoma varen in neškodljiv, primeren za uporabo kjerkoli in kadarkoli.

Lastnosti aspiratorja

- Hiter – uporaba traja le nekaj sekund
- Učinkovit in varen
- Uporaben tudi med spanjem otroka
- Uporaben – lahek in lepo oblikovan, enostaven in varen za uporabo, ne povzroča bolečin ali neugodja
- Antibakterijski – aspirator je možno čistiti z vodo, posodico za zbiranje izcedka se da sterilizirati v vreli vodi ali pod paro
- Zanesljiv – napajajo ga baterije, ni ga potrebno polniti; vedno je v pripravljenosti
- Varčen – dve navadni alkalni bateriji zadostujeta za pribl. 1000 uporab (po 5 sekund)
- Garancija eno leto

Varnostni ukrepi

- Aspirator je zasnovan tako, da odstrani odvečen nosni izcedek pri otrocih; ne uporabljajte ga v druge namene
- Pred uporabo preverite ali je silikonska kapica čvrsto pritrjena na vrhno odprtino
- Aspirator je namenjen izključno osebni uporabi, naj ga ne uporablja več oseb saj lahko privede do širitve nalezljivih bolezni
- Aspirator je namenjen samo uporabi doma; ne sme se ga uporabljati v komercialne ali medicinske namene

Previdnost ni odveč


1. Preverite, ali je pokrov baterij dobro zaprt preden očistite aspirator; obrišite morebitno vlago z ohišja, preden ga odprete
2. Ne odstranjujte vijakov ali fiksno pritrjenih gumijastih delov saj lahko tako poškodujete napravo ali povzročite, da voda pronica v napravo.
3. Ne čistite naprave z abrazivnimi sredstvi ali detergenti!
4. Če se aspirator poškoduje ali preneha normalno delovati, ga odnesite na servis

Pred pošiljanjem v servis ni odveč preveriti ali je nameščeno tesnilo na posodici, kajti brez tesnila ni podtlaka!

Napotki za uporabo

Očistite napravo kot je opisano v poglavju »Čiščenje naprave« pred uporabo.


1. Nameščanje baterij

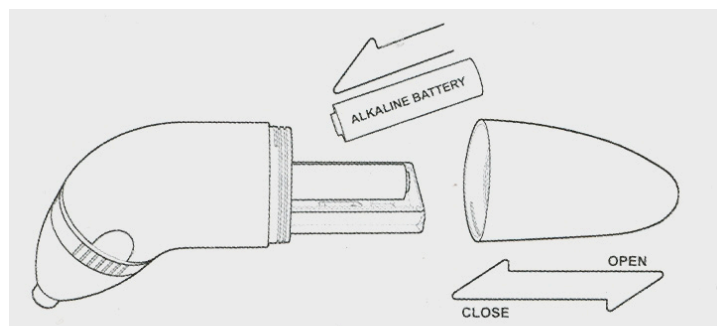

1. Odstranite pokrov baterij (pred tem posušite napravo, če je mokra)
2. Vstavite dve navadni alkalni 1,5 voltni bateriji (3 AA)
3. Zaprite pokrov

* Odstranite baterije, če naprave dolgo ne boste uporabljali

2. Nameščanje in odstranjevanje pokrova posodice

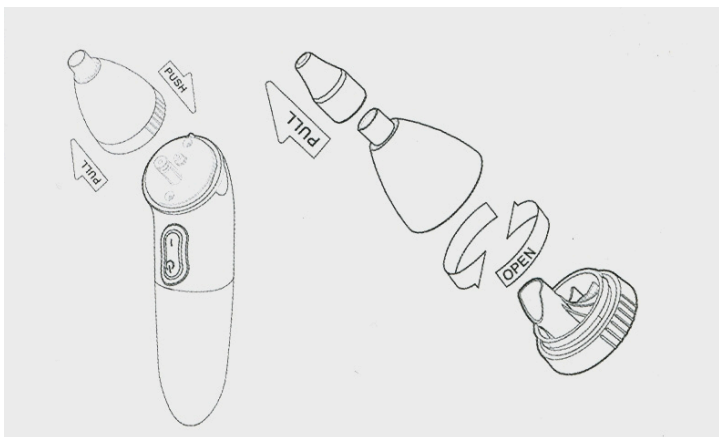

1. Potegnite podnožje posodice in ga odstranite
2. Odstranite silikonski nosnik
3. Obrnite pokrov posodice, kot je prikazano na sliki
4. Za ponovno namestitev ponovite postopek v obratnem vrstnem redu

3. Vklp/izklop

Pritisnite zgornjo stran (I) gumijastega gumba za vklop, spodnjo (0) za izklop.

4. Sesanje izcedka


1. Čvrsto pritrdite posodico in silikonski nosnik
2. Vklpite napravo
3. Nastavite silikonski nosnik na nosno odprtino za pribl. 3 sekunde in izcedek bo stekel v prostor za zbiranje izcedka
4. Očistite aspirator, kot je opisano v poglavju »Čiščenje naprave«

5. Čiščenje naprave

Odstranite posodico, kot je opisano v poglavju »Napotki za uporabo« preden začnete s čiščenjem!

1. Čiščenje pokrova in podnožja posodice ter nosnika

1. Odstranite pokrov in podnožje posodice ter silikonski nosnik in jih skrbno operite z vodo
2. Sterilizirajte z vrelo vodo ali paro

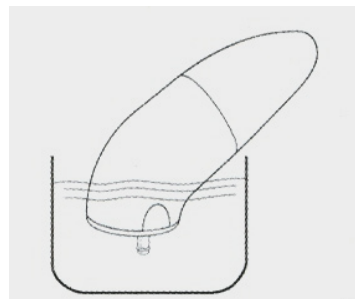

2. Čiščenje ohišja in črpalke

1. Prepričajte se, da je prostor za baterije čvrsto zaprt
2. Odstranite posodico
3. Namočite napravo v posodo z mlačno vodo (glej sliko); vklopite aspirator in črpalka se bo očistila (hitrost črpalke je 5000 obratov/minuto, zato je 5 sekund dovolj)
4. Zamenjajte vodo in postopek ponovite, če je potrebno
5. Zunanje dele aspiratorja očistite z vodo in nevtralnimi detergentom
6. Obrišite napravo do suhega z mehko krpo

6. Tehnične specifikacije

Napajanje: 2 (dve) AA 3 baterije (nista priloženi), priporočamo alkalne baterije
Sesanje: približno 50 kPa (niha glede na preostanek energije baterij)
Velikost: 17cm x 4,2cm x 4,7cm (D x Š x V)
Teža: 145g (brez baterij)

Garancijski list

1. Firma in naslov sedeža garanta: DIAFIT d.o.o., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi
2. Datum dobave blaga: _____
3. Podatki, ki identificirajo blago: _____
4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.
5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščen servis: DIAFIT d.o.o., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi



ZASTOPSTVO IN SERVIS ZA SLOVENIJO

DIAFIT d.o.o.

Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi

Tel.:(n.c.): 02 / 674 08 50

Veleprodaja: 02 / 674 08 51, 02 / 674 08 52

Maloprodaja: 02 / 674 08 54

Servis: 02 / 674 08 60

Fax.: 02 / 674 08 89

E-pošta: info@diafit.si

www.diafit.si